


CÁNULA ASPIRACIÓN INTRAUTERINA FLEXIBLE (TIPO KARMAN)

DESCRIPCIÓN

- Para la interrupción voluntaria de embarazo o después de un aborto espontáneo.
- La flexibilidad del material permite un curetaje delicado después de la evacuación.
- Disponible en 9 medidas diferentes con un código de color para una fácil identificación.
- Se conecta directamente al tubo de aspiración.

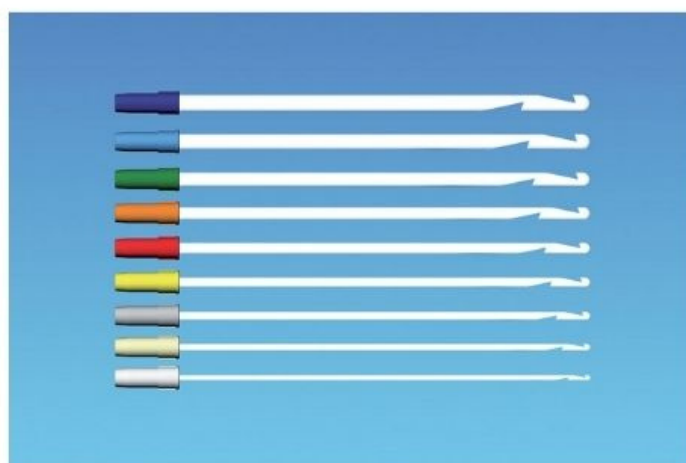

Ref.	Longitud	Diámetro Φ	Color	
720114	24 cm	6 mm	Gris	
720115	24 cm	7 mm	Amarillo	
720116	24 cm	8 mm	Naranja	
720117	24 cm	9 mm	Rojo	
720118	24 cm	10 mm	Verde	
720119	24 cm	11 mm	Cyan	
720120	24 cm	10 mm	Azul	
720156	24 cm	4 mm	Blanco	
720157	24 cm	5 mm	Beige	

Cahnos S.L.

Plaza Virgen de la Capilla, 4 28039 Madrid
Tel. 91 378 22 23 -24 -25- 26 Fax 91 378 22 33


www.cahnos.com

INSTRUCCIONES PARA EL USO

- Previa dilatación del canal cervical, si es necesaria, introducir la sonda a través del orificio del cuello uterino.
- Luego, empujarla hasta tocar el fondo del útero.
- Conectarla al sistema de aspiración.
- Girar 360° para aspirar toda la superficie del útero.
- Repetir 2 - 3 veces efectuando siempre este movimiento rotatorio, retirar la sonda hacia el orificio interior del cuello y después extraerla.
- Tras su uso, desecharla.

ADVERTENCIAS

- No efectuar movimientos laterales y no superar la cantidad medida por el histerómetro.
- Se debe utilizar sólo bajo estricto control médico.
- Utilícese inmediatamente después de la apertura del envase.

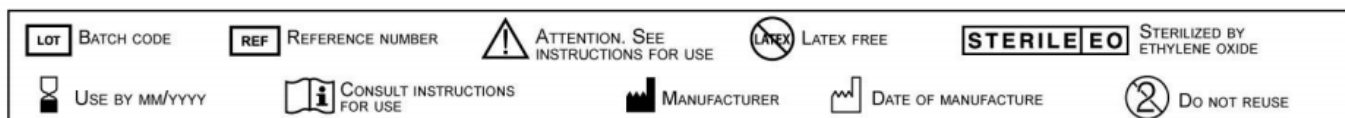

Cahnos S.L.

Plaza Virgen de la Capilla, 4 28039 Madrid
Tel. 91 378 22 23 -24 -25- 26 Fax 91 378 22 33

www.cahnos.com