


CÁNULA DE ASPIRACIÓN INTRAUTERINA (RÍGIDA-CURVA)

DESCRIPCIÓN

- Para la interrupción voluntaria de embarazo o después de un aborto espontáneo.
- Una acanaladura opaca sobre la cánula permite de visualizar la profundidad de penetración.
- El número que señala el diámetro de la cánula señala también la orientación del punto de aspiración.
- Disponible en 6 medidas diferentes.
- Se conecta directamente al tubo de aspiración.

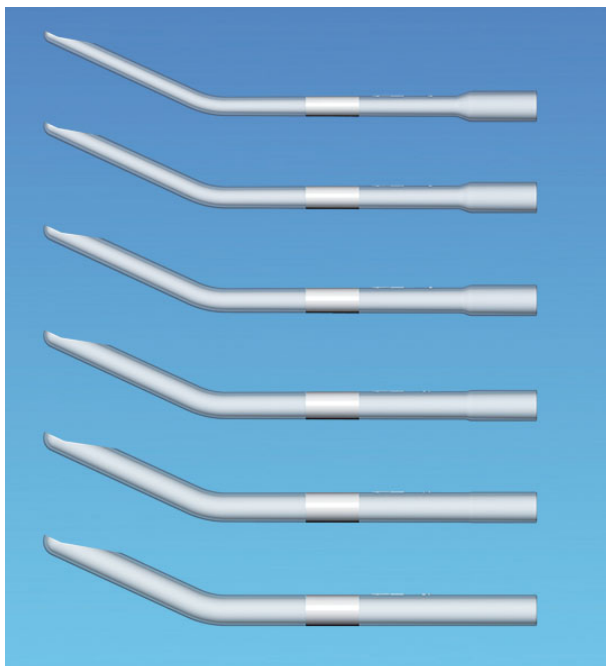

Ref.	Diámetro	Longitud
720167	7 mm	18 cm
720126	8 mm	18 cm
720127	9 mm	18 cm
720128	10 mm	18 cm
720129	11 mm	18 cm
720130	12 mm	18 cm

Cahnos S.L.

Plaza Virgen de la Capilla, 4 28039 Madrid
Tel. 91 378 22 23 -24 -25- 26 Fax 91 378 22 33

www.cahnos.com

INSTRUCCIONES PARA EL USO

- Previa dilatación del canal cervical, si es necesaria, introducir la sonda a través del orificio del cuello uterino.
- Luego, empujarla hasta tocar el fondo del útero.
- Conectarla al sistema de aspiración.
- Girar 360° para aspirar toda la superficie del útero
- Repetir 2 - 3 veces efectuando siempre este movimiento rotatorio, retirar la sonda hacia el orificio interior del cuello y después extraerla.
- Tras su uso, desecharla.

ADVERTENCIAS

- No efectuar movimientos laterales y no superar la cantidad medida por el histerómetro.
- Se debe utilizar sólo bajo estricto control médico.
- Utilícese inmediatamente después de la apertura del envase.

LOT BATCH CODE	REF REFERENCE NUMBER	 ATTENTION. SEE INSTRUCTIONS FOR USE	 LATEX FREE	STERILE EO STERILIZED BY ETHYLENE OXIDE
 USE BY MM/YYYY	 CONSULT INSTRUCTIONS FOR USE	 MANUFACTURER	 DATE OF MANUFACTURE	 DO NOT REUSE

Cahnos S.L.

Plaza Virgen de la Capilla, 4 28039 Madrid
Tel. 91 378 22 23 -24 -25- 26 Fax 91 378 22 33

www.cahnos.com