


ENDOCIC ESTÉRIL CON MANDRIL DE ACERO

REF.720195

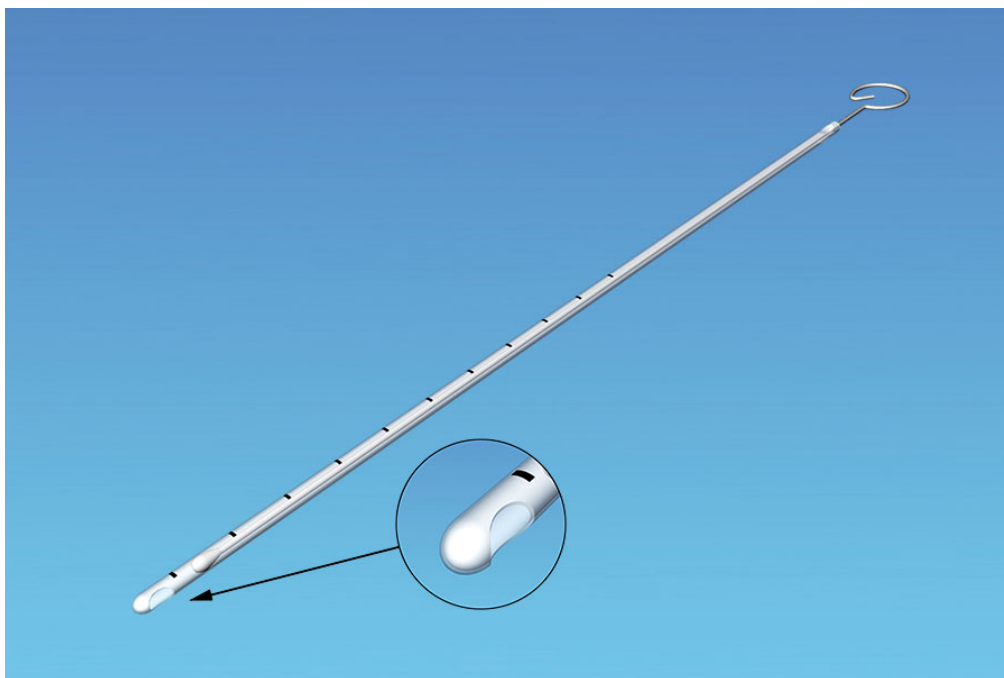

DESCRIPCIÓN

- Para la toma de muestras de células endometriales.
- El diámetro particularmente sutil, indicado en cuellos de útero estenótico y mujeres en menopausia, permite un tamizaje del endometrio fácil e indoloro, evitando la dilatación o la tracción del cuello del útero.
- Un émbolo en acero se mueve al interno de una cubierta externa en plástica con un agujero lateral en la extremidad.
- La escala de medición sobre la cubierta es de 1 a 12 cm (resolución 1 cm).

Ref.	Diámetro	Longitud
720195	2,4 mm	28,5 cm

Cahnos S.L.

Plaza Virgen de la Capilla, 4 28039 Madrid
Tel. 91 378 22 23 -24 -25- 26 Fax 91 378 22 33

www.cahnos.com

INSTRUCCIONES PARA EL USO

- Introducir delicadamente ENDOCIC en la cavidad endometrial, a través del canal vaginal, hasta el fondo del útero.
- Teniendo agarrado el tubo exterior, tirar para atrás del piston interior hasta que se detenga.
- De este modo se hace una presión negativa al interior de ENDOCIC. Dejar el piston, hacia atrás, al máximo.
- Girar ENDOCIC lateralmente entre los dedos moviendo la punta hacia adelante y hacia atrás desde el fondo del útero, hasta el cuello interior, del utero.
- Con esta operación, el tejido entrará en el dispositivo.
- Sacar ENDOCIC del cuello del útero, y cortar inmediatamente la punta.
- Empujar el pistón dentro del tubo interior, para sacar toda la muestra de endometrio en el interior de un contenedor con solución de fijador istologica.
- Deshacerse del dispositivo después de usar.

ADVERTENCIAS

- Durante la introducción no sobrepasar la medida que muestra el isterometro
- Leer las instrucciones antes de usar.
- No reutilizar. Utilizar solo si el envase no está abierto o dañado.
- Utilizar inmediatamente despues de abrir el envase.
- Destruir despues del uso de acuerdo a las normas vigentes.
- Puede ser utilizado solamente por personal médico especializado.

 LOT BATCH CODE	 REF REFERENCE NUMBER	 ATTENTION. SEE INSTRUCTIONS FOR USE	 LATEX FREE	 STERILE  EO STERILIZED BY ETHYLENE OXIDE
 USE BY MM/YYYY	 CONSULT INSTRUCTIONS FOR USE	 MANUFACTURER	 DATE OF MANUFACTURE	 DO NOT REUSE

Cahnos S.L.

Plaza Virgen de la Capilla, 4 28039 Madrid
Tel. 91 378 22 23 -24 -25- 26 Fax 91 378 22 33

www.cahnos.com