


TRANSFER EASY - CATÉTER PARA TRANSFERIR EMBRIONES EN ÚTEROS NORMALES

REF.770116

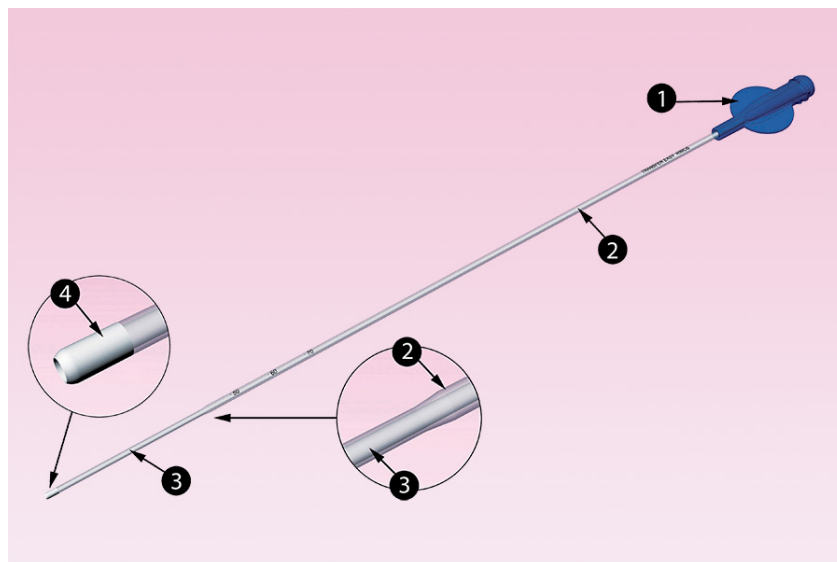

DESCRIPCIÓN TRANSFER EASY

- Indicado para el trasferto de embriones en la cavidad uterina en las procedimientos de fecundación invitro, en presencia del cuello del útero con permeabilidad normal.
- El catéter está formado por: una porción proximal rígida (2) de diámetro exterior de 2 mm y diámetro interior de 1,10 mm para la inserción facilitada a través del cuello del útero; una porción distal flexible (3) y flexible de 4 cm de longitud, con un diámetro exterior de 1.50 mm y diámetro interior de 1.10 mm; punta redondeada ecogénica para un trasferto facilitado, delicado y no traumático.
- El catéter tiene una marca a 5, 6 y 7 cm de la extremidad distal para un correcto posicionamiento en la cavidad uterina.
- El material transparente ayuda a visualizar claramente la punta del catéter (4) durante la fase de trasferto embrionario.
- Un puerto Luer lock hembra con dos aletas (1) hace de empuñadura y ha de agarrarse seguro a la jeringuilla.
- Realizados test de embriotoxicidad (MEA) y control de las endotoxinas bacterianas (LAL).

REF.	Extremidad proximal: d.e. / d.i.	Extremidad distal: d.e. / d.i.
770116	2.0 mm /1.1 mm	1.5 mm /1.1 mm

Cahnos S.L.

Plaza Virgen de la Capilla, 4 28039 Madrid
Tel. 91 378 22 23 -24 -25- 26 Fax 91 378 22 33

www.cahnos.com

INSTRUCCIONES DE USO

Introducir el speculum, visualizar el cuello del utero y, si fuera posible remover cuidadosamente el muco cervical. "Tocar" minimamente el cuello del utero con una gasa mojada en terreno de cultura para embriones. Conectar el cateter inyector a la jeringuilla de insulina e introducirlo en la cavidad uterina despues de haber aspirado los embrines. Colocar los embriones en el punto deseado, sin tocar el fondo del utero, con la ayuda de la escala centimetrada que tiene el catetere inyector. Gracias a la punta del inyector visible ecograficamente la procedura puede ser ecoguiada. Despues de colocar los embriones, retirar delicadamente el inyector, y ayudandose con el estereomicroscopio, verificar que se han espulsado todos los embriones.

ADVERTENCIA

Leer las instrucciones antes de usar. No reutilizar. Utilizar solo si el envase no está abierto o dañado. Utilizar inmediatamente después de abrir el envase. Destruir después del uso de acuerdo a las normas vigentes. Puede ser utilizado solamente por personal médico especializado.

 LOT BATCH CODE	 REF REFERENCE NUMBER	 ATTENTION. SEE INSTRUCTIONS FOR USE	 LATEX FREE	STERILE EO STERILIZED BY ETHYLENE OXIDE
 USE BY MM/YYYY	 CONSULT INSTRUCTIONS FOR USE	 MANUFACTURER	 DATE OF MANUFACTURE	 DO NOT REUSE

Cahnos S.L.

Plaza Virgen de la Capilla, 4 28039 Madrid
Tel. 91 378 22 23 -24 -25- 26 Fax 91 378 22 33

www.cahnos.com