


AINSEWHITE- CANULA DE INSEMINACIÓN INTRA UTERINA SIN MANGO

REF.770219

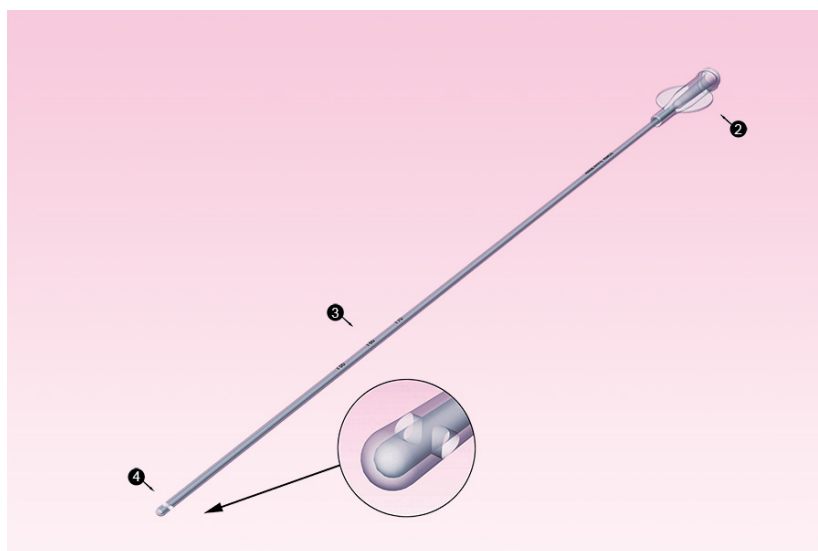

DESCRIPCIÓN AINSEWHITE

- Para un fácil transferimiento del espermia lavado en la cavidad uterina, en los procedimientos de IA (Inseminación Artificial).
- Las cánulas tienen una punta redondeada (4), dos orificios laterales y tienen una escala de medición en centímetros (3).
- La transparencia del material permite de verificar el buen éxito del deposito.
- Un conector luer lock funciona como empuñadura y permite una conexión segura a la jeringa para la inyección del espermia.
- Las dos aletas laterales (2) alineadas con los dos orificios en la punta permiten el orientamiento durante el posicionamiento.
- Esterilizado con Rayos Beta para excluir el riesgo de toxicidad causado de eventuales residuos de óxido de etileno.
- AINSEWHITE no se puede utilizar en la fertilización in vitro y transferimiento intratubárico de gametos.
- Realizados test de embriotoxicidad (MEA) y control de las endotoxinas bactericas(LAL).

REF.	Ø exterior	Longitud
770219	2.0 mm	195 mm

Cahnos S.L.

Plaza Virgen de la Capilla, 4 28039 Madrid
Tel. 91 378 22 23 -24 -25- 26 Fax 91 378 22 33

www.cahnos.com

INSTRUCCIONES DE USO

Introducir el espéculo. Quitar la mucosidad del cuello uterino. Introducir la cánula i.u. a través del cuello uterino hasta aproximadamente el fondo del útero. Recoger el esperma en una jeringa. Extraer con suavidad el mandril de la cánula. Conectar la jeringa al empalme de la cánula i.u. Inyectar el esperma con chorros lentos y discontinuos para reducir al mínimo el reflujo. Dejar reposar la paciente en posición reclinada durante unos 15 - 20 minutos.

ADVERTENCIA

Durante la introducción, no superar la cantidad medida con el histerómetro para evitar riesgos de perforación. Leer las instrucciones antes del uso. No reutilizar – utilizar sólo si el envase se encuentra íntegro. Utilizar inmediatamente después de la apertura del envase. Eliminar después de su uso en conformidad con la legislación vigente. El dispositivo tiene que ser utilizado exclusivamente por personal médico especializado.

LOT BATCH CODE	REF REFERENCE NUMBER	 ATTENTION. SEE INSTRUCTIONS FOR USE	 LATEX FREE	STERILE EO STERILIZED BY ETHYLENE OXIDE
 USE BY MM/YYYY	 CONSULT INSTRUCTIONS FOR USE	 MANUFACTURER	 DATE OF MANUFACTURE	 DO NOT REUSE

Cahnos S.L.

Plaza Virgen de la Capilla, 4 28039 Madrid
Tel. 91 378 22 23 -24 -25- 26 Fax 91 378 22 33

www.cahnos.com