


DOUBLECYTE N - AGUJAS DE ASPIRACIÓN OVACITARIA DE DOBLE LUMEN Y LAVADO FOLICULAR

REF.770301/TL

REF.770308/TL

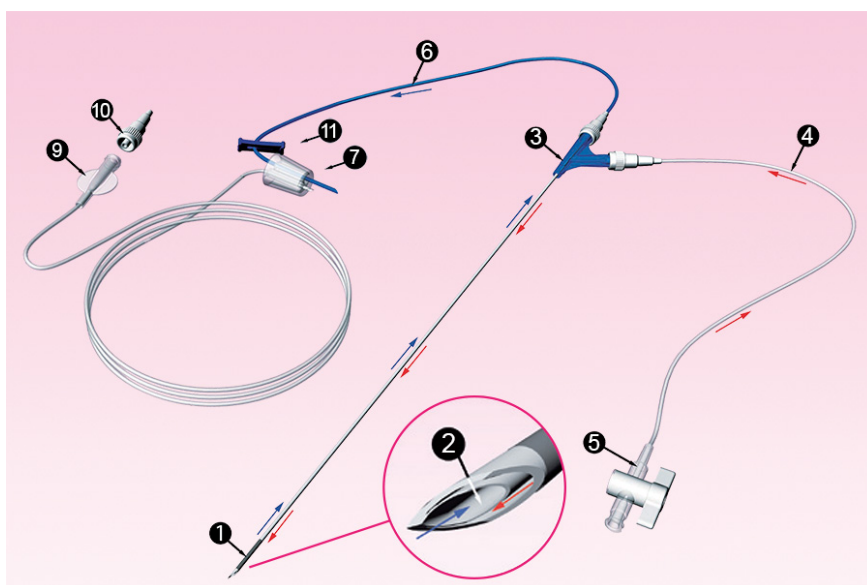

DESCRIPCIÓN DOUBLECYTE-N

- Para la recogida atraumática de ovocitos en las procedimientos de fecundación in vitro. Aguja de doble lumen y doble vía, una para la aspiración de los ovocitos (6) y la otra para el lavado folicular (4).
- Punta afilada atraumática (1) que permite una exportación ecoguiada y una penetración fluida y ágil en los tejidos.
- La aspiración de los ovocitos se produce a través del lumen interno de la aguja (2) y prosigue por un tubo azulado que se encarga de proteger los ovocitos contra los rayos UV.
- El tubo de aspiración termina con un tapón de goma termo plástica medica (7) que se conecta a la probeta sellado el líquido folicular al interior.
- La empuñadura de la aguja consiste en un racor en Y (3) provisto de dos racores universales que dan a la aguja gran versatilidad.
- El lavado folicular se realiza mediante un tubo plástico transparente de 100 cm de largo (4) que lleva un grifo en el extremo (5) y pasa por el lumen externo de la aguja.
- La aspiración folicular es regulada por una plaquita sujetatubos (11).
- La conexión a la bomba de aspiración se realiza mediante un tubo de 80 a 100 cm de largo que lleva en el extremo un racor luer lock hembra (9); esta versión tiene además otro adaptador que permite varias tipologías de conexión.
- Posibilidad de identificar la medida de la aguja gracias al código de colores del racor en Y : azul para el 16G y blanco para el 17 G.
- Realizados test de embriotoxicidad (MEA) y control de las endotoxinas bacterias (LAL).

REF.	MEDIDA AGUJA	LONGITUD AGUJA
770301/TL	16G	330mm
770308/TL	17G	330mm

Cahnos S.L.

Plaza Virgen de la Capilla, 4 28039 Madrid
Tel. 91 378 22 23 -24 -25- 26 Fax 91 378 22 33

www.cahnos.com

INSTRUCCIONES DE USO

Prepare la zona vaginal de la paciente y el campo estéril. Utilice una funda de sonda vaginal para proteger la sonda de ultrasonido y conéctela a una guía de aguja. Asegúrese de que la conexión está bien asegurada. Introduzca la sonda de ultrasonido en la vagina para confirmar la persistencia del folículo y su accesibilidad. Bajo control eco gráfico, introduzca DOUBLECYTE o DOUBLECYTE-N en la aguja-guía conectada a la sonda de ultrasonidos. Empuje la aguja a través de la pared vaginal con firmeza hasta alcanzar el estroma ovárico y el folículo. Suavemente aspirar un folículo tras otro mediante una bomba de vacío controlada. Realizar el lavado del folículo a través de la segunda vía del sistema que está provista de una llave de paso. Al final del procedimiento retirar la sonda de ultrasonido y la aguja. El uso de DOUBLECYTE en lugar de DOUBLECYTE-N y viceversa, depende de la conexión de la aguja a la bomba de aspiración. Dentro de DOUBLECYTE, un conector luer-lock hembra, se conecta directamente al tubo de la bomba. En el caso de DOUBLECYTE-N, la aguja se conecta a la bomba mediante un tubo de extensión de 80/100 cm y un conector luer-lock hembra. Ambas versiones se suministran con un adaptador adicional (10) que permite múltiples conexiones.

ADVERTENCIA

Leer las instrucciones antes de usar. No reutilizar. Utilizar solo si el envase no está abierto o dañado. Utilizar inmediatamente después de abrir el envase. Destruir después del uso de acuerdo a las normas vigentes. Puede ser utilizado solamente por personal médico especializado. Puede contener trazas de níquel.

 LOT BATCH CODE	 REF REFERENCE NUMBER	 ATTENTION. SEE INSTRUCTIONS FOR USE	 LATEX FREE	STERILE EO STERILIZED BY ETHYLENE OXIDE
 USE BY MM/YYYY	 CONSULT INSTRUCTIONS FOR USE	 MANUFACTURER	 DATE OF MANUFACTURE	 DO NOT REUSE

Cahnos S.L.

Plaza Virgen de la Capilla, 4 28039 Madrid
Tel. 91 378 22 23 -24 -25- 26 Fax 91 378 22 33

www.cahnos.com