


BIMONOCYTE N - AGUJAS DE ASPIRACIÓN OVACITARIA Y LAVADO FOLICULAR

REF.770304/TL
REF.770302/TL

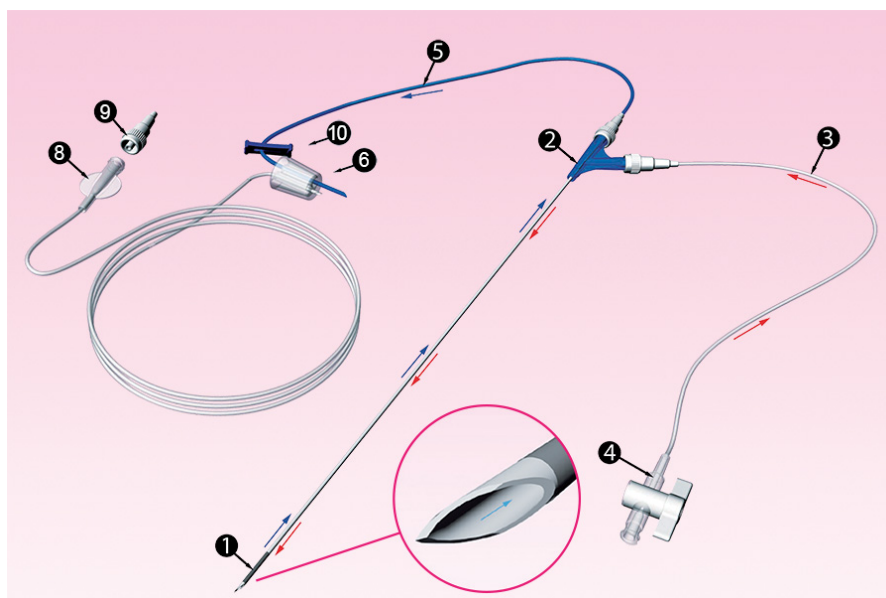

DESCRIPCIÓN BIMONOCYTE-N

- Para la recogida atraumática de óvulos en las procedimientos de fecundación in vitro.
- Aguja a un solo conducto y doble vía, una para aspiración del ovulo (5) y otra para el lavado folicular (3).
- Punta ecogénica con afiladura atraumática (1) que permite una exportación ecoguiada y una penetración facilitada de los tejidos.
- La aspiración de los óvulos se produce a través de un tubo en material de plástico celeste que protege el ovulo de los rayos UV.
- El tubo de aspiración termina con un tapón de goma termoplástica médica (6) que se conecta a la probeta sellada el líquido folicular al interior.
- La conexión de la aguja a los tubos de aspiración y de lavado se realiza mediante un racor en Y (2) (que sirve también de empuñadura) provisto de dos racores universales que dan a la aguja gran versatilidad.
- La empuñadura de la aguja tiene dos alas en línea con la afiladura de la punta para orientar al operador durante la fase de penetración.
- La vía del lavado (3) está construida en material plástico transparente de 100 cm que termina con una válvula unidireccional (4) que impide el reflujo de líquido.
- La aspiración folicular está regulada por una placa estranguladora (10).
- Conexión a la bomba de aspiración a través de un tubo de 80 a 100 mm que acaba con un puerto luer lock hembra (8); esta versión tiene además otro adaptador (9) que permite varias tipologías de conexión.
- Posibilidad de identificar la medida de la aguja gracias al código de color de la empuñadura.
- Realizados tests de embriotoxicidad (MEA) y control de las endotoxinas bacterianas (LAL).

REF.	MEDIDA AGUJA	LONGITUD AGUJA
770302/TL	17G	330mm
770304/TL	16G	330mm

Cahnos S.L.

Plaza Virgen de la Capilla, 4 28039 Madrid
Tel. 91 378 22 23 -24 -25- 26 Fax 91 378 22 33

www.cahnos.com

INSTRUCCIONES DE USO

Prepare la zona vaginal de la paciente y el campo estéril si es necesario. Proteger la sonda de ultrasonidos con un escudo estéril y conéctala a una aguja guía. Asegúrese de que la aguja guía está conectada a la sonda. Introducir la sonda en la vagina para comprobar la presencia de folículos persistencia y accesibilidad folicular. Bajo la guía de ultrasonido, inserte BIMONOCYTE o BIMONOCYTE-N en la aguja guía conectada a la sonda. Empujar la aguja a través de la pared vaginal hasta perforar el estroma ovárico y el folículo. Aspirar los folículos uno tras otro con una bomba de succión. Realice un lavado folicular a través del segundo a través del segundo canal del sistema equipado con una válvula unidireccional. Al final del procedimiento retire la sonda y la aguja. El uso de BIMONOCYTE en lugar de BIMONOCYTE-N y viceversa, depende del tipo de conexión de la aguja a la bomba de aspiración, que se considera la más adecuada. BIMONOCYTE se conecta a la bomba de aspiración mediante un acoplamiento macho (7) . BIMONOCYTE-N es se conecta a la bomba de aspiración mediante un tubo de conexión de 80/100 cm y un conector luer-lock hembra (8) con adaptador (9) que permite diferentes posibilidades de conexión.

ADVERTENCIA

Leer las instrucciones antes de usar. No reutilizar. Utilizar solo si el envase no está abierto o dañado. Utilizar inmediatamente después de abrir el envase. Destruir después del uso de acuerdo a las normas vigentes. Puede ser utilizado solamente por personal médico especializado. Puede contener trazas de níquel.

 LOT BATCH CODE	 REF REFERENCE NUMBER	 ATTENTION. SEE INSTRUCTIONS FOR USE	 LATEX FREE	STERILE EO STERILIZED BY ETHYLENE OXIDE
 USE BY MM/YYYY	 CONSULT INSTRUCTIONS FOR USE	 MANUFACTURER	 DATE OF MANUFACTURE	 DO NOT REUSE

Cahnos S.L.

Plaza Virgen de la Capilla, 4 28039 Madrid
Tel. 91 378 22 23 -24 -25- 26 Fax 91 378 22 33

www.cahnos.com