


OMNI S- CATÉTER PARA TRANSFERIR EMBRIONES EN ÚTEROS DE CUELLOS DIFICULTOSOS

REF.770407

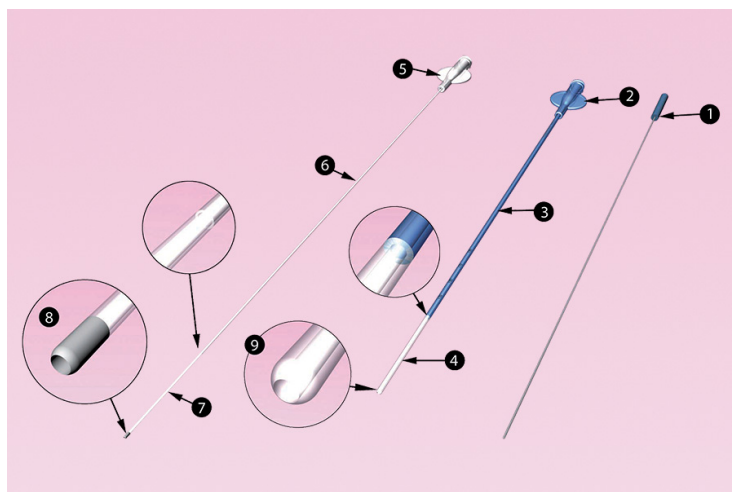

DESCRIPCIÓN TRANSFER OMNI-S

- Indicado para la transferencia de embriones a la cavidad uterina en los procedimientos de fecundación in vitro, en condiciones de canal estrecho.
- Particularmente indicado en presencia de cuello del utero curvado estenótico gracias al mandril en acero maleables del diametro de 0.4 mm.
- El set esta compuesto de: un catéter introductor azul (3) con diámetro exterior de 2 mm y escala graduada puesta a 5, 6, 7 y 8 cm de la punta distal para un correcto posicionamiento en la cavidad uterina. El extremo distal transparente y suave (4) con punta decreciente (9) permite curvar el catéter como se desea después de introducir el mandril de acero maleable con revestimiento de plástico (1);
- un cateter de transferencia de embriones con diametro exterior de 1 mm que se distingue por su punta decreciente guiada por ultrasonidos (8) con porción proximal rígida (6) y porción distal suave (7) para un transito ágil, delicado y atraumatico a través del introductor.
- El catéter cuenta con un conector luer lock hembra (5) para el enganche a la jeringhilla.
- El material transparente permite de visualizar claramente la punta del cateter durante la fase de transferencia.
- Largo catéter introductor: 140 mm
- Largo catéter de transferencia: 210 mm
- Realizados test de embriotoxicidad (MEA) y control de las endotoxinas bactericas (LAL).

REF.	Cateter introductor: d.e. / d.i.	Cateter trasferidor: d.e. / d.i.	TALLA
770407	2.0 mm / 1.2 mm	1.0 mm / 0.7 mm	S

Cahnos S.L.

Plaza Virgen de la Capilla, 4 28039 Madrid
Tel. 91 378 22 23 -24 -25- 26 Fax 91 378 22 33

www.cahnos.com

INSTRUCCIONES DE USO

Introducir el speculum, visualizar el cuello del utero y, si fuera posible remover cuidadosamente el muco cervical. "Tocar" minimamente el cuello del utero con una gasa mojada en terreno del cultura para embriones. Introducir el catetere guia con el mandril en el cuello del utero hasta la parte interna del mismo. Girar el mandril y sacarlo del cateter. Insertar delicadamente el cateter de transferencia, que anteriormente se ha cargado con los embriones, a través del cateter guia al interno del utero hasta llegar al punto para transferirlos, sin tocar el fondo del utero para no provocar la contracción del mismo. La escala graduada presente en el cateter guia ayuda a verificar la profundidad mientras los marcadores presentes en la parte proximal del cateter de transferencia muestran la alineación de las puntas de los dos. Gracias a la punta del cateter guia visible ecográficamente se puede hacer una procedura eco-guiada. Después de transferir los embriones, sacar los dos catetere contemporanea y lentamente para evitar aspiraciones, y verificar con el estereomicroscopio que todos los embriones hayan sido espulsados.

ADVERTENCIA

Leer las instrucciones antes de usar. No reutilizar. Utilizar solo si el envase no está abierto o dañado. Utilizar inmediatamente después de abrir el envase. Destruir después del uso de acuerdo a las normas vigentes. Puede ser utilizado solamente por personal médico especializado.

 LOT BATCH CODE	 REF REFERENCE NUMBER	 ATTENTION. SEE INSTRUCTIONS FOR USE	 LATEX FREE	STERILE EO STERILIZED BY ETHYLENE OXIDE
 USE BY MM/YYYY	 CONSULT INSTRUCTIONS FOR USE	 MANUFACTURER	 DATE OF MANUFACTURE	 DO NOT REUSE

Cahnos S.L.

Plaza Virgen de la Capilla, 4 28039 Madrid
Tel. 91 378 22 23 -24 -25- 26 Fax 91 378 22 33

www.cahnos.com