


AINSEBLUE T - CANULA DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL CON PUNTA ABIERTA

REF.770408

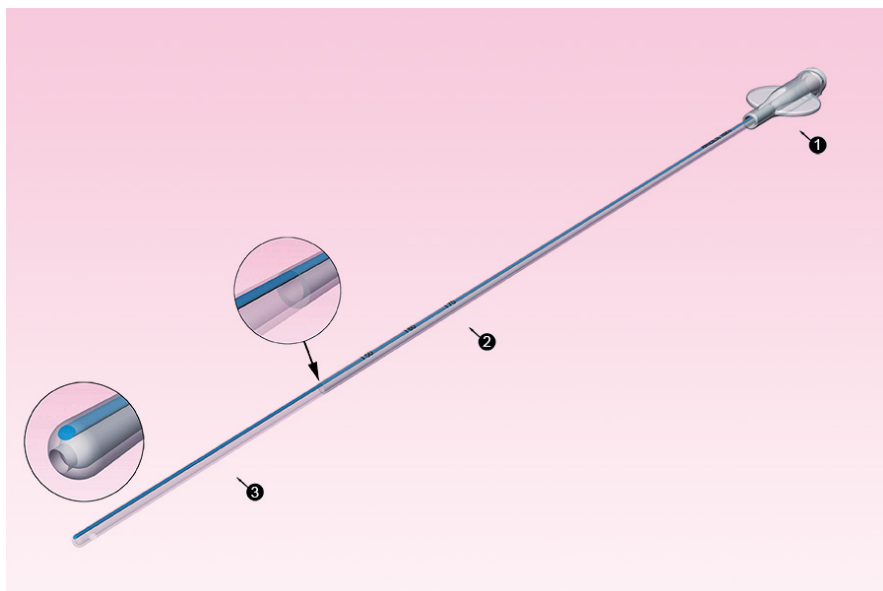

DESCRIPCIÓN AINSEBLUE T

- Para facilitar la transferencia del semen preparado a la cavidad uterina, en procedimientos de IA (Inseminación artificial).
- Se trata de una cánula transparente y radiopaca con lumen individual, caracterizada por dos grados diferentes de flexibilidad:
 1. Una porción proximal rígida (2) para una introducción fácil a través del cuello uterino
 2. Una porción distal suave y flexible (3) para introducir el semen en forma delicada y atraumática.
 3. Una escala de medición (50- 60 – 70 mm) determina la profundidad de introducción.
 4. Un racor luer lock hembra (1) sirve de empuñadura y garantiza la unión segura de la jeringa para la inyección del esperma.
 5. Las dos aletas laterales alineadas con los dos agujeros que se encuentran en los extremos de la cánula permiten orientarse durante la colocación.
 6. El líquido seminal sale por la punta decreciente abierta.
- AINSEBLUE no debe emplearse para fertilización in Vitro ni para la transferencia intratubárica de gametos. Realizados test de embriotoxicidad (MEA) y control de las endotoxinas bactericas (LAL).

REF.	Ø exterior / Ø interior	Longitud
770113	2.0 mm/1.3 mm	174 mm (sin empuñadura)

Cahnos S.L.

Plaza Virgen de la Capilla, 4 28039 Madrid
Tel. 91 378 22 23 -24 -25- 26 Fax 91 378 22 33

www.cahnos.com

INSTRUCCIONES DE USO

Introducir el espéculo. Quitar la mucosidad del cuello uterino. Recoger el esperma en una jeringa. Conectar la jeringa al empalme de la cánula. Introducir AINSEBLUE a través del cuello uterino hasta aproximadamente el fondo del útero. Inyectar el esperma con chorros lentos y discontinuos para reducir al mínimo el reflujo. Dejar reposar a la paciente en posición reclinada durante unos 15 - 20 minutos.

ADVERTENCIA

Durante la introducción, no superar la cantidad medida con el histerómetro para evitar riesgos de perforación. Leer las instrucciones antes del uso. No reutilizar – utilizar sólo si el envase se encuentra íntegro. Utilizar inmediatamente después de la apertura del envase. Eliminar después de su uso en conformidad con la legislación vigente. El dispositivo tiene que ser utilizado exclusivamente por personal médico especializado.



Cahnos S.L.

Plaza Virgen de la Capilla, 4 28039 Madrid
Tel. 91 378 22 23 -24 -25- 26 Fax 91 378 22 33

www.cahnos.com