



DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL LISTO PARA USAR

Steranios 2%

PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS, EQUIPOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS, EQUIPOS DE ENDOSCOPIA Y EQUIPOS SENSIBLES AL CALOR.

- Producto listo para usar: sin necesidad de activación previa
- Activo frente a bacterias, levaduras, hongos, virus y micobacterias en 10 minutos
- Posible control de la conformidad de la solución desinfectante mediante el uso de tiras reactivas (cada 4 horas)




Steranios 2%

Para dispositivos médicos, equipos médicos y quirúrgicos, equipos de endoscopia y equipos sensibles al calor.


CARACTERÍSTICAS

- Solución verde
- 2% solución de glutaraldehído tamponada a pH 6 (citrato sódico)
- Amplia compatibilidad con todo tipo de materiales


INSTRUCCIONES DE USO

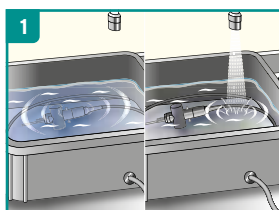


1 Limpieza/ predesinfección: limpie el dispositivo médico con un detergente o un producto de predesinfección. Enjuague bien. Para equipos endoscópicos limpie previamente las partes internas y externas del dispositivo médico.

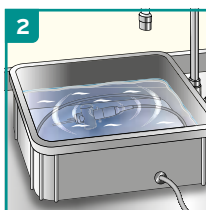

2 Desinfección: verter la solución. Mantenga el baño de remojo cubierto durante el tiempo de contacto. Respete el tiempo mínimo de contacto. Para equipos endoscópicos: hacer circular la solución dentro de los canales.

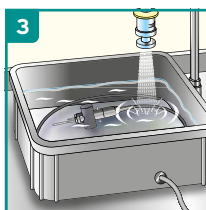

3 Enjuague bien con agua esterilizada o filtrada (0,2 µm) para eliminar cualquier rastro del producto. Para equipos endoscópicos: enjuague las partes internas y externas del dispositivo médico

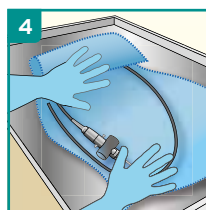

4 Secar con una toalla de un solo uso. Mantener el dispositivo médico lo más asépticamente posible para volver a utilizarlo. Almacenamiento máximo del baño de remojo: 30 días

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS

REIVINDICACIONES DE EFICACIA/ CONDICIONES	TIEMPO DE CONTACTO
Bactericida según EN 13727, EN 14561 (condiciones limpias)	5 min
Levaduricida según EN 14348, EN 14563 (condiciones limpias)	10 min
Fungicida según EN 13624, EN 14562 (condiciones limpias)	10 min
Tuberculicida según EN 14348, EN 14563 (condiciones limpias)	10 min
Micobactericida según EN 14348, EN 14563 (condiciones limpias)	10 min
Virucida según EN 14476, EN 17111 (condiciones limpias)	10 min
Esporicida frente C. Difficile según EN 17126 (condiciones limpias)	60 min

EMBALAJE

PRODUCTO	UNIDAD DE EMBALAJE	REFERENCIA
Steranios 2%	4 x Envases de 5L	5168
Steranios 2%	Tiras reactivas de Steranios 2%	4872

INDICACIONES

Desinfectante de alto nivel para dispositivos médicos, equipos médicos y quirúrgicos, equipos de endoscopia y equipos sensibles al calor.

INSTRUCCIONES DE USO

Producto listo para usar solo para uso profesional. Limpiar y enjuagar cuidadosamente los dispositivos médicos antes de sumergirlos en STERANIOS 2%.

- 1. Limpieza previa:** limpie el dispositivo médico con un detergente o un producto predesinfectante. Enjuague bien. Para equipos endoscópicos utilice cepillos para la limpieza de los canales.
- 2. Desinfección:** Vierta la solución de Steranios 2%. Mantenga el baño de remojo cubierto durante el tiempo de contacto. Respete el tiempo mínimo de contacto. Para equipos endoscópicos: hacer circular la solución dentro de los canales.
- 3. Enjuagar abundantemente** con agua esterilizada o filtrada (0,2 µm) para eliminar cualquier rastro del producto. Para equipos endoscópicos: enjuague las partes internas y externas del dispositivo médico.
- 4. Seque con una toalla de un solo uso.** Mantenga el dispositivo médico lo más asépticamente posible para volver a utilizarlo. Almacenamiento máximo del baño de remojo: 30 días.

COMPOSICIÓN

Steranios 2% es una solución de glutaraldehído al 2% (expresada en 100% del principio activo), estabilizada a un pH 6 en presencia de un agente catalizador.

ALMACENAMIENTO

Peligroso - respete las precauciones de uso (elaboradas según la normativa europea vigente en materia de clasificación y etiquetado de productos químicos). Almacenamiento: de + 5 °C a + 25 °C.

CERTIFICADOS

Producto sanitario. La información sobre la actividad antimicrobiana completa se encuentra recogida en el dossier de producto disponible bajo petición.

PRODUCTO SANITARIO

Por favor leer la etiqueta del producto.



PARA USO PROFESIONAL.



LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Distribuido por:
INSTRUNET HOSPITAL SLU
Ctra Sabadell a Granollers km 14,5
08185 Lliçà de Vall (Barcelona)
España



www.anios.com