

ANIOSYME SYNERGY 5

DETERGENTE LÍQUIDO DE
5 ENZIMAS CON AMPLIO
ESPECTRO DE EFICACIA Y
POTENTE ACCIÓN LIMPIADORA





Detergentes

Indicaciones:

Limpieza del material médico, quirúrgico, endoscopios y dispositivos médicos. Apto su uso en inmersión, cubeta de ultrasonidos, lavadora automática y túnel de lavado.

Composición:

Agentes tensioactivos, agente secuestrante, agente estabilizante, complejo enzimático (amilasa, celulasa, lipasa, mananasa, proteasa), excipientes.

Modo de empleo:



Solución concentrada para uso profesional.

Se utiliza diluido del 0.1% al 0.5 %.

Eficaz a partir de 1 minuto.

Adaptar la concentración, el tiempo de contacto y la temperatura del agua de dilución en función del grado de suciedad y del método de limpieza empleado.

Cepillar si es necesario.

Enjuagar cuidadosamente.

Temperatura máxima: 60°C.

Precauciones:

Información disponible en la ficha de datos de seguridad y en la etiqueta.

Almacenamiento: de +5°C a +35°C.

Producto sanitario de clase I (Directiva 93/42/CEE modificada).

Presentaciones:

Ref. 4841. – 1 Garrafa de 5 litros (Cajas de 4 unidades)

Ref. 4840. – 1 Envase de 1 litro (Cajas con 12 unidades)



SLU, Ctra. Sabadell a Granollers, Km 14,5 (C-155)
08185 Lliçà de Vall - Barcelona - España
Tél. +34 93 860 95 00 Fax. +34 93 843 96 95
www.instrunethospital.com

