

TEST HEPATITIS C

REF.V05C-INFO



FICHA TÉCNICA

Propósito	La prueba anti-VHC es un inmunoensayo cromatográfico para la detección rápida y cualitativa de anticuerpos generados contra proteínas codificadas por secuencias de núcleo conservadas, NS3, NS4, NS5 porciones del genoma de VHC en sangre entera / suero/ plasma humano.	
Reactivos	Antígenos recombinantes de VHC (CORE, NS3, NS4, NS5), anti-VHC anticuerpos monoclonales, antígenos VHC recombinantes (CORE, NS3, NS4, NS5) conjugados con partículas de oro coloidal.	
Almacenamiento	El dispositivo de la prueba se debe mantener fuera del contacto directo con la luz del sol, humedad, calor y fuentes de radiación. Almacenar a 4-30°C / 39-86°F). El dispositivo de la prueba se debe de utilizar máximo una hora después de haber abierto la envoltura.	
Control de calidad	Las pruebas tienen características de control de calidad incorporadas. Cuando la prueba se ha completado, el usuario verá una línea coloreada en el área "C" en muestras negativas y una línea coloreada en las áreas "T" y "C" en muestras positivas.	
Precauciones	1. Para uso profesional y diagnóstico in vitro únicamente. 2. No se debe utilizar el kit de prueba una vez la fecha de caducidad haya expirado. 3. El dispositivo de la prueba debe permanecer sellado en su empaque original hasta que se utilice. 4. Utilice guantes desechables mientras realice la prueba. 5. Utilice un gotero nuevo para cada muestra. 6. El dispositivo de pruebas se debe desechar en un contenedor de material de riesgo biológico, después de haber realizado la prueba. 7. Todas las muestras de los pacientes se deben considerar como muestras con potencial riesgo de transmisión de enfermedades. 8. No congele y descongele las muestras de suero, plasma repetidamente. 9. No utilice muestras turbias ni hemolizadas. Las muestras de prueba turbias deben centrifugarse. 10. No utilice muestras hemolíticas puesto que pueden conducir a resultados falsos o inválidos. 11. Esta prueba indicará únicamente la presencia o ausencia de AgHBs en la muestra y no se debería utilizar como el único fundamento para el diagnóstico de una infección por hepatitis viral.	
Interpretación de los resultados	Negativo: Sólo se muestra una línea coloreada en el área "C", indicando que no existen anticuerpos de hepatitis C. Positivo: Se muestran dos líneas coloreadas en las áreas "C" y "T", indicando que existen anticuerpos de superficie de hepatitis C. Bajas concentraciones de anticuerpos de superficie de hepatitis B podrían causar una línea tenue en el área "T", que aún así se debe considerar esa línea tenue como "positivo". Inválida: No es visible ninguna línea coloreada o una única línea coloreada es visible en el área "T"; la prueba se debe repetir utilizando un nuevo dispositivo de prueba.	

Cahnos S.L.

Plaza Virgen de la Capilla, 4 28039 Madrid
Tel. 91 378 22 23 -24 -25- 26 Fax 91 378 22 33

www.cahnos.com