

TEST VIH / SIDA

REF.V06-INFO



Propósito	La 1/2 Prueba Anti-VIH es un inmunoensayo rápido y cualitativo para la detección de anticuerpos (IgG, IgA e IgM) generados contra todos los subtipos del tipo 1 del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH-1) (incluyendo el grupo 0) y del tipo (VIH-2) en sangre entera/suero/plasma humano.
Reactivos	Antígenos VIH recombinante, Anticuerpo monoclonal anti-VIH y antígeno VIH recombinado y conjugado con partículas de oro coloide.
Almacenamiento	El dispositivo de la prueba se debe mantener fuera del contacto directo con la luz del sol, humedad, calor y fuentes de radiación. Almacenar a 4-30°C /39-86°F). El dispositivo de la prueba se debe de utilizar máximo una hora después de haber abierto la envoltura.
Control de calidad	Las pruebas tienen características de control de calidad incorporadas. Cuando la prueba se ha completado, el usuario verá una línea coloreada en el área "C" en muestras negativas y una línea coloreada en las áreas "T" y "C" en muestras positivas.
Precauciones	1. Para uso profesional y diagnóstico in vitro únicamente. 2. No se debe utilizar el kit de prueba una vez la fecha de caducidad haya expirado. 3. El dispositivo de la prueba debe permanecer sellado en su empaque original hasta que se utilice. 4. Utilice guantes desechables mientras realice la prueba. 5. Utilice un gotero nuevo para cada muestra. 6. El dispositivo de pruebas se debe desechar en un contenedor de material de riesgo biológico, después de haber realizado la prueba. 7. Todas las muestras de los pacientes se deben considerar como muestras con potencial riesgo de transmisión de enfermedades. 8. No congele y descongele las muestras de suero, plasma repetidamente. 9. No utilice muestras turbias ni hemolizadas. Las muestras de prueba turbias deben centrifugarse. 10. No utilice muestras hemolíticas puesto que pueden conducir a resultados falsos o inválidos. 11. Esta prueba indicará únicamente la presencia o ausencia de anti-VIH en la muestra y no se debería utilizar como el único fundamento para el diagnóstico de VIH.
Interpretación de los resultados	Negativo: Sólo se muestra una línea coloreada en el área "C", indicando que no existen anticuerpos de VIH. Positivo: Se muestran dos líneas coloreadas en las áreas "C" y "T", indicando que existen anticuerpos de VIH. Bajas concentraciones de anticuerpos de VIH podrían causar una línea tenue en el área "T", que aún así se debe considerar esa línea tenue como "positivo". Inválida: No es visible ninguna línea coloreada o una única línea coloreada es visible en el área "T"; la prueba se debe repetir utilizando un nuevo dispositivo de prueba.



Cahnos S.L.

Plaza Virgen de la Capilla, 4 28039 Madrid
Tel. 91 378 22 23 -24 -25- 26 Fax 91 378 22 33

www.cahnos.com